

## Nesesuger (Varenr. 8018)

### ***Bruk:***

Hold barnet sittende. Trykk ballongen flat før spissen føres inn i barnets nese. Slip ballongen langsomt og forsiktig.

### ***Rengjøring:***

Før bruk skilles delene og vaskes i vann. Skyll grundig. Sørg for at nesesugeren er helt tør før bruk. Vask alltid straks etter bruk.

### ***Steriliseringsveiledning:***

Steriliseres i en sterilisator iht. denne produsentens instruksjer eller kokes i 5 min.

### ***ADVARSEL:***

Trykk ikke på ballongen mens spissen er inne i neseboret

